
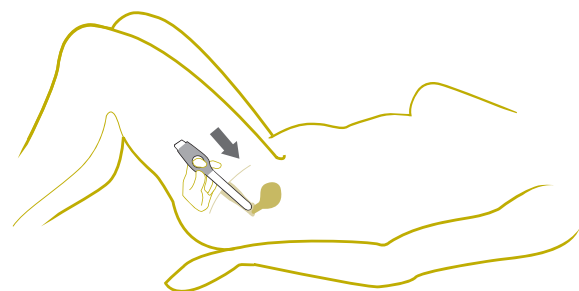


## Les instruksjonene nøye før du bruker Delphi Screener

Delphi Screeneren gjør det mulig å innhente en væskeprøve fra din livmorhals og vagina på en enkel og smertefri måte. Delphi Screeneren har blitt designet for å forsikre seg om at toppen kommer nærme livmorhalsen når den settes inn i vagina.


Toppen inneholder en liten mengde (ca 1 teskje) med sterilt vann. Ved å trykke på knappen på bunnen vil det sterile vannet spres rundt i livmorhalsområdet. Når knappen slippes opp, vil væsken trekkes tilbake inn i Screeneren med væske fra livmorhalsen og vagina. Etter å ha fjernet Screeneren fra vagina, overføres så prøven til plast-røret som følger med. Laboraoret vil teste prøven.

Ikke bruk Screeneren dersom du har menses eller om du aldri har hatt samleie. Dersom du bruker vaginale medisiner må du slutte å bruke disse 2 dager før du bruker Screeneren. Du kan forstatt bruke vaginale ringer, kondomer eller vann-basert glidemiddel som vanlig. Per i dag, er det ingen erfaringer med bruk av Screeneren under graviditet, men på grunn av de avrundede kantene er det ikke forventet noen sikkerhetsrisiko ved anvendelse under graviditet.

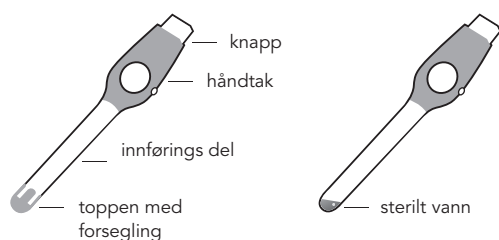

## Preparering

- 1 Sjekk innholdet av konvolutten:
  - a. Delphi Screener
  - b. Plastikk rør
  - c. Plastikk pose med adsorberende pad
  - d. Studie dokumenter
  - e. Returkonvolutt
  - f. Instruksjoner og spørreskjema

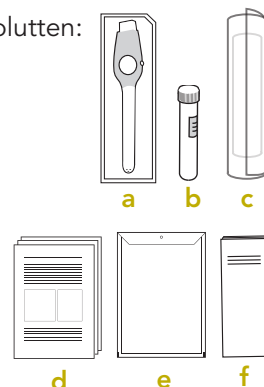


- 2 Vask hendene.




- 3 Ta ut plastikk røret, skru av korken og hold dem lett tiggjengelig.




- 4 Åpne pakken med Screeneren helt.

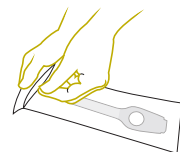

- 5 Ta ut Screeneren ved å ta tak i det blå håndtaket.

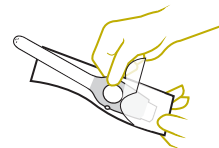

- 6 Dra av forseglingen på toppen av Screeneren. Noen vanddråper kan være synlige.

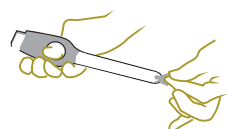

## Velg din stilling

- 7 **A: Liggende**  
Dekk til en pute med et håndkle. Ligg med rompa puten. Trekk opp knærne og spre bena.



### **B: Sittende**

Sit med bena spredt på do-setet.



## Hvordan utføre prøvetakingen

Etter prøvetaking kan det hende at det kommer noe væske ut av vagina. Dette er ikke et problem. Bare små mengder av væsken fra røret trengs for å utføre testen. Det kan hende at det er noe slim og blood på Screeneren etter testen- dette er helt normalt og vil ikke påvirke testresultatene.

- 8 Hold Screeneren ved det blå håndtaket som vist på bildet og bruk den andre hånden til å spre kjønnsleppene. Før Screeneren sakte og forsiktig inn i vagina så langt som mulig og vend den bakover til du føler litt motstand.




- 9 Hold Screeneren mens du trykker den hvite knappen helt ned.




- 10 Tell til 3.



- 11 Slipp opp knappen og ta Screeneren ut av vaginaen sakte mens du roterer den. Væsken vil da flyte tilbake inn i Screeneren. Noen ganger går ikke den hvite knappen umiddelbart tilbake til sin startposisjon når man tar Screeneren ut.

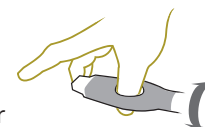

- 12 Hold toppen av Delphi Screeneren halvveis inn i plastikk røret. Hold røret og Screeneren i loddrett posisjon. Press knappen på Screeneren helt ned. Prøven vil tømmes inn i røret. Prøven vil ikke være gjennomsiktig og kan inneholde noe slim; dette er helt normalt.

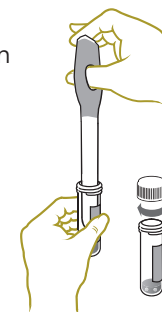

- 13 Ta Screeneren ut av røret. Plasser lokket på plastikk røret og pass på at det er skrudd ordentlig igjen.


## Hva gjøres etter prøvetakingen

- 14 Screeneren kan kun brukes en gang.  
Kast Screeneren i søpla etter bruk.


- 15 Vaks hendene igjen.



- 16 Putt plastikk røret med væsken inn i plastposen med adsorberende paden. Lukk posen med selvforseglingslåsen.

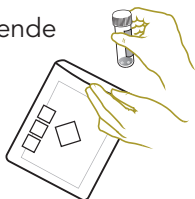

- 17 Putt posen med røret og spørreskjemaet i returkonvolutten. Frankering er allerede betalt.

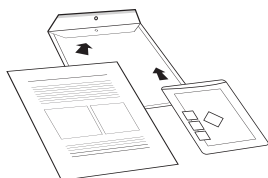

**RETURER PRØVEN INNEN  
24 TIMER ETTER PRØVETAKING  
FOR Å GARANTERE KVALITETEN  
AV PRØVEN!**

## Generell informasjon


Du kan ikke bruke Screeneren etter best før datoen. Denne kan du finne på posen hvor Sceneneren er pakket inn i (☞-....).

Dersom posen rundt Screeneren er åpnet eller ødelagt kan ikke steriliteten til testen garanteres og en ny en må benyttes.

For mer informasjon og for å se animert video om hvordan screeneren skal brukes, vennligst gå til [www.delphiscreener.com](http://www.delphiscreener.com). Nettsiden og videoen er kun på engelsk.

For more information or for an animation video on the use of the Screener, please visit [www.delphiscreener.com](http://www.delphiscreener.com). The site is in English.

STERILE R

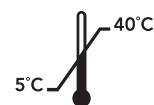

Delphi Bioscience B.V.  
Glashorst 126  
3925 BV Scherpenzeel  
The Netherlands



Dato for siste revisjon: april 2013

-210040-

### Ansvarsfraskrivelse

Delphi Bioscience tar ikke ansvar på noen som helst måte for uforsvarlig eller feil bruk av den medisinske testen. Dersom, etter å ha lest disse instruksjonene, det er spørsmål eller tvil om hvordan testen skal utføres, vennligst ta kontakt med den lokale helpdesken.



**Bruerveiledning Delphi Screener**

delphi  
bioscience