





Bruksanvisning avføringsprøve

1 I denne forsendelsen skal du ha mottatt:


- brev
- bruksanvisning
- prøverør
- oppsamlingspapir
- liten plastpose med lukking
- returkonvolutt

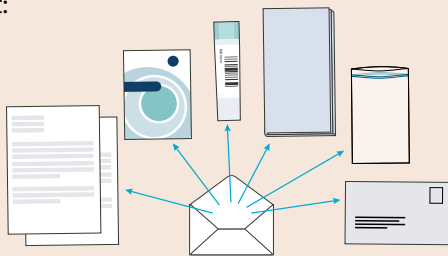

2 Kontroller at ditt navn og fødselsdato er trykt på røret. Stemmer ikke informasjonen, må du ikke ta prøven, men ta kontakt med oss for å få tilsendt et nytt rør.



3 Fest hjørnene på oppsamlingspapiret direkte på toalettsskålen.

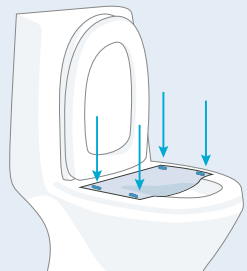

4 Oppsamlingspapiret er klart til bruk. Unngå at det kommer urin på det.




5 Skru det grønne lokket slik at røret åpnes. Prøven tas med pinnen som er festet til lokket.


Ikke hell ut væsken som allerede er i røret.




6 Før pinnen over overflaten på avføringen i begge retninger.

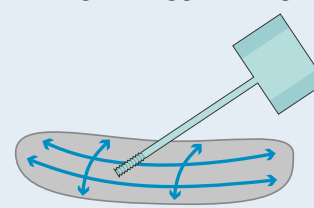

7 Det er kun rillene på pinnen som skal dekkes med avføring. Pass på så du ikke får for mye avføring på pinnen.

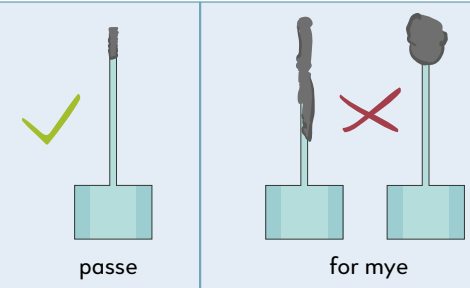

8 Sett pinnen tilbake i røret og skru lokket til du hører et klikk.

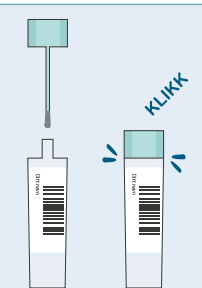


9 Løsne papiret fra toalettsskålen og skyll ned 2 - 3 ganger. Papiret vil gå i oppløsning.



10 Legg røret i plastposen. Pass på at forseglingen er godt lukket.


Posen med røret legges i den vedlagte konvolutten. Porto er betalt.

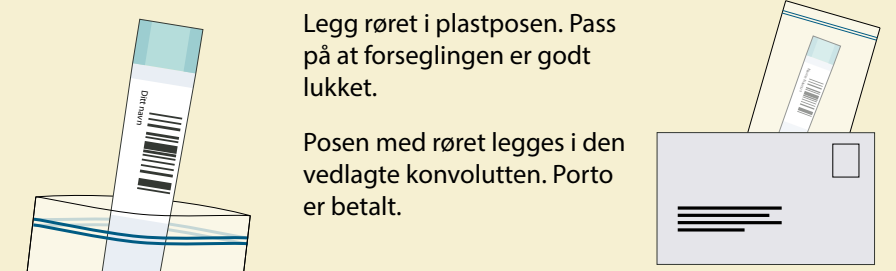

11 Brevet med prøven bør postes samme dag. Har du ikke mulighet til dette, oppbevares prøven i kjøleskap til du får sendt den.

12 Prøven blir analysert for blod i avføringen. Du får svar fra oss uansett resultat.





Ønsker du mer informasjon, kan du lese mer på våre nettsider:
tarmscreening.no